

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Медицинский массажер безопасен и прост в использовании
- Обеспечивает безболезненный и эффективный массаж
- Имеет устойчивый терапевтический эффект
- Снимает тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет
- Эффективен при болях в спине, мышечных болях, жировых отложениях в проблемных местах

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Массажер **MH-103** оборудован лампой ионного излучения. Отрицательно заряженные ионы, которые еще называют «воздушными витаминами», известны своим благотворным влиянием на организм. Они придают силы и бодрость человеку, ускоряют метаболические процессы в организме, замедляют процесс старения.

Переутомление, эмоциональный стресс ослабляют иммунную систему человека и могут стать причиной различных тяжелых заболеваний (язва, гипертония, онкологические болезни) и перерасти в состояние тяжелой депрессии. Массажер поможет снять ежедневные стресс и усталость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	От сети переменного тока 220 В (50 Гц)	
Мощность	25 Вт	
Скорость вибрации	Режим «I»: 9 000 ± 900 уд./мин Режим «II»: 12 000 ± 1 200 уд./мин	
Вес	1 700 г	
Размеры	145 x 420 x 150 мм	
Условия эксплуатации	эксплуатации	хранения
Температура	От +10°C до +40°C	От -10°C до +60°C
Влажность	От 30% до 85%	От 30% до 95%

ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- Перед чисткой массажера отключите прибор от сети.
- Протирайте корпус прибора чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства, мыльный раствор и т.д. По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Серийные номера приборов компании ЭЙ энд ДИ включают в себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN E1107 001491, где информативными являются выделенные цифры – 1107

11 – год производства, 07 – месяц производства.

Гарантийные сроки установлены в соответствии со статьями 470 и 471 ГК РФ и статьей 19 пункт 2 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Высокое качество прибора подтверждено Регистрационным удостоверением №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011.

Гарантийный срок прибора – 1 год.

Установленный производителем в соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» срок службы (срок, в течение которого товар пригоден для эффективного использования по назначению) прибора равен 5 годам при условии, что прибор используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Адрес изготовителя:

ICST Corporation, S-4 Tower 5-17-1 Kamiyochi, Chuou-ku
Saitama-shi, Saitama-ken, Japan
Factory in China: Vega Technologies Inc., Yang-Wu District, Da
Lang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China

АЙ-СИ-ЭС-ТИ КОРПОРЕЙШН, С-4 Тауэр 5-17-1 Камиочий,
Чуо-Ку, Сaitама-ши, Сaitама-кен, Япония
Завод в Китае: Vega Технолоджи Инк., Янг-Ву Дистрикт, Да
Ланг Таун, Донг Гуан Сити, Гуанг Донг Провинс, Китай

Фирма-импортер:

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», 121357, Москва, ул. Верейская, д.17
Тел.: 8 800-200-03-80; отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ



NOZOMI
Tokyo, JAPAN

Модель MH-103

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Японская компания **ICST Corporation (Ай Си Эс Ти Корпорейшн)**, фирма-импортер «ЭЙ энд ДИ РУС», благодарит Вас за покупку медицинского массажера, созданного на основе самых передовых технологий. Мы уверены, что оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MH-103 массажер медицинский обеспечивает эффективный массаж, имеет устойчивый терапевтический эффект, снимает тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет. **Перед применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.**

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

Основной блок в корпусе (с четырьмя насадками) – 1 шт.



Руководство по эксплуатации (на русском языке) – 1 шт.

MI ICSTMH103 0913

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не допускайте никаких изменений или модернизаций. Это может вызвать нарушение нормальной работы прибора.
- Не допускайте падений или сильных ударов прибора. Это может вызвать его повреждение.
- Храните прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы избежать поражения электрическим током или травмирования.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети в доме соответствует напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Отключайте массажер от сети, если Вы не пользуетесь им, а также перед чисткой.
- Отключайте прибор от сети только сухими руками.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Для уменьшения риска повреждения прибора не подвергайте его воздействию влаги.

ВНИМАНИЕ

- Перед началом массажа проконсультируйтесь с врачом.
- Массажер не предназначен для проведения массажа головы.
- Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед началом массажа обратитесь к врачу.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас имеются повреждения или воспаление кожных покровов.
- Не используйте лампу ионного излучения более 10 минут.

ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

При включении и отключении прибора от сети не касайтесь вилки мокрыми руками!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА




1. Установите переключатель в положение «0» и подключите прибор к сети.
2. Выберите нужный режим и установите функциональный переключатель в положение «I» или «II».
3. При необходимости ионного излучения установите переключатель ионного излучения в положение «On».




- Если Вы используете прибор больше 10 минут, установите переключатель ионного излучения в положение «Off».
- Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
- Продолжительность массажа не должна превышать 4 минут для отдельной части тела и 10 минут в общем. Повторное использование прибора возможно только через 10 минут.
- Используйте прибор не менее чем через час после принятия пищи.
- По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «0».
- Отключите прибор от сети.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Массаж шеи, плечевого пояса и рук

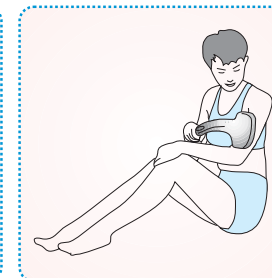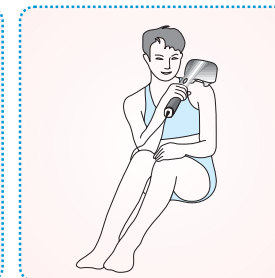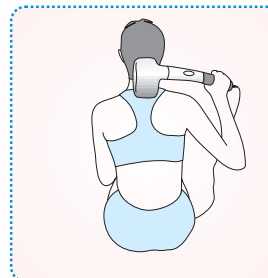

Массаж ног и ступней

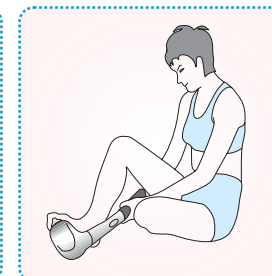

Массаж спины, бедер и абдоминальной области

